


ACTIVE *Sinnflut*®

Woman

Stimulationshilfe für Frauen

Wiederaufladbar

Gebrauchsanweisung

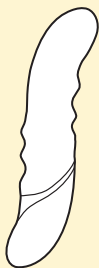


Deutsch



MED*intim*

personal healthcare

Die Teile des ACTIVE*Sinnflut*[®] Woman

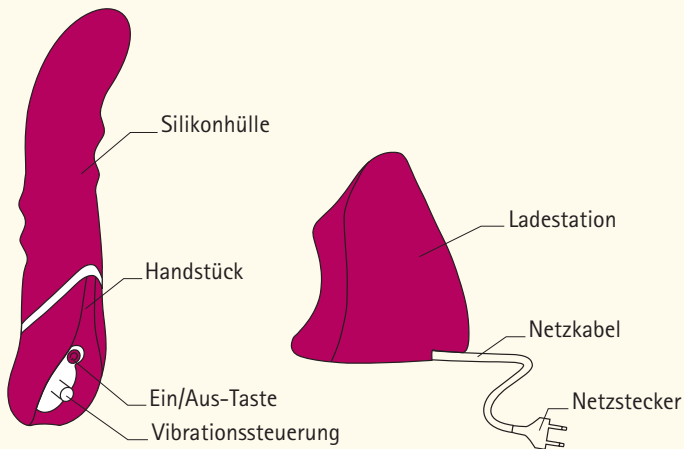

Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres **ACTIVE*Sinnflut*[®] Woman** Vibrators mit Ladestation und wünschen viel Vergnügen mit diesem Produkt. Um eine stets optimale und sichere Leistung und Funktion zu garantieren, bitten wir Sie um folgendes:

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
- Führen Sie nur Tätigkeiten an dem Gerät durch, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.

Falls Sie nach dem Lesen dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, setzen Sie sich mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung oder besuchen Sie unsere Webseite: **www.medintim.de**

Verpackung

Das **ACTIVE*Sinnflut***[®] **Woman** Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.

Verpackungen bestehen aus wiederverwertbaren Rohstoffen und sind in den Rohstoffkreislauf zurückzuführen.

Wichtige Hinweise

Bei der Entwicklung der **ACTIVE*Sinnflut***[®] Produkte wurde auf hohe Verarbeitungsqualität geachtet. Dennoch sind bei Benutzung elektrischer Geräte spezielle Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Reduzierung des Risikos lebensgefährlicher Stromschläge

- Stellen Sie die Ladestation nicht über Bade-, Duschwannen oder Waschbecken, in die sie fallen könnte.
- Tauchen Sie die Ladestation inklusive Kabel und Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie nicht nach einer Ladestation, die ins Wasser gefallen ist, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Schließen Sie die Ladestation nicht an eine Steckdose mit falscher Spannung an, sondern nur an Steckdosen mit dem auf dem Typenschild (Unterseite Ladestation) angegebenen Spannungswerten. Spannungswandler und Adapter gewährleisten nicht die Einhaltung der Spannungsanforderungen.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht gewaltsam in eine Steckdose.
- Halten Sie Elektrogeräte von Kindern fern.

Reduzierung der Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich nach Maßgabe dieser Bedienungsanleitung und benutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde.

- Ladestation und Vibrator dürfen nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Öffnen Sie die Ladestation auf keinen Fall selber, da durch unsachgemäße Handlungsweise Verletzungsgefahr besteht.
- Ziehen Sie den Netzstecker von der Ladestation nicht an dem Netzkabel aus der Steckdose, da das Netzkabel beschädigt werden könnte.
- Benutzen Sie die Ladestation nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet oder nachdem es in Wasser getaucht wurde.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur durch unser Service-Team oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden.

Standortwahl für die Ladestation

- Stellen Sie die Ladestation nicht in Feuchträume oder in die Nähe von wassergefüllten Behältern.
- Stellen Sie die Ladestation ausschließlich auf einen horizontalen, ebenen und rutschfesten Untergrund, um ein Kippen zu vermeiden.
- Wählen Sie den Standort an einer Steckdose, die mit dem 1,40 Meter langen Netzkabel von der Ladestation erreichbar ist.
- Normalerweise hinterlassen die Füße der Ladestation keine Spuren auf der Abstellfläche, dies kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.
- Vermeiden Sie eine übermäßige Belastung durch Rauch, Staub, Erschütterung, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Medizinische Hinweise

Die für den Vibrator eingesetzten Materialien sind konform mit den Richtlinien des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) und der FDA (US Food and Drug Administration).

- Benutzen Sie keinen Vibrator mit beschädigter oder eingerissener Silikonhülle.
- Der **ACTIVESinnflut® Woman** Vibrator dient ausschließlich zur Massage und Intimstimulation. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.
- Fragen Sie vor dem Einsatz des Vibrators Ihren Arzt um Rat, wenn in den vergangenen 2 Monaten ein chirurgischer Eingriff an betreffenden Körperstellen vorgenommen wurde.
- Setzen Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung, wenn nach der Verwendung Beschwerden auftreten.
- Elektrische Geräte können sich gegenseitig in ihrer Funktion beeinflussen. Halten Sie deshalb mit dem Gerät einen Abstand von mindestens einem Meter zu medizinischen Geräten ein.
- Haben Sie als Träger eines Herzschrittmachers Fragen zur Verwendung des Geräts, setzen Sie sich mit Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Herzschrittmachers in Verbindung. **ACTIVESinnflut®** Produkte sollten problemlos mit den meisten marktgängigen Herzschrittmachern verwendbar sein.
- Der **ACTIVESinnflut® Woman** Vibrator ist für den individuellen Gebrauch bestimmt. Falls das Gerät von mehreren Personen genutzt werden sollte, wird die jeweils einmalige Verwendung von geprüften Kondomen als Schutzüberzug über die Silikonhülle dringend empfohlen. Das Risiko einer Übertragung von Krankheitserregern wird dadurch reduziert.

Benutzung

Vermeiden Sie ein Abknicken oder Verdrehen der Silikonhülle. Dies kann zur Beschädigung der Silikonhülle oder der Vibrationselemente führen.

Verwenden Sie den **ACTIVESinnflut® Woman** Vibrator ausschließlich mit wasserbasierenden Gleitmitteln. Langanhaltender Gebrauch von silikonölkhaltigen Gleitmitteln kann zu dauerhaften Veränderungen der Silikonhüllenoberfläche führen.


Der **ACTIVESinnflut® Woman** Vibrator ist zur Verlängerung der Akkulebenszeit mit einem Tiefentladungsschutz versehen, der das Gerät bei Erreichen der minimalen Akkukapazität automatisch abschaltet. Bevor die automatische Abschaltung erfolgt, wird mit kurzen Unterbrechungen der Vibration auf das Erreichen der minimalen Akkukapazität hingewiesen. Laden Sie das Gerät nach der automatischen Abschaltung in der Ladestation wieder auf.

Der **ACTIVESinnflut® Woman** Vibrator kann vor Gebrauch gekühlt oder erwärmt werden. Achten Sie darauf, dass dabei der Temperaturbereich von 0° bis +40° Celsius nicht überschritten wird. Bei sinkenden Temperaturen nimmt die Leistung der Akkus ab. Vermeiden Sie schlagartige Temperaturwechsel.


Inbetriebnahme und Steuerung

Betätigen Sie den Ein/Aus-Taster und Steuerungsstift jeweils nur bis zum spürbaren Druckpunkt und der wahrnehmbaren Vibrationsänderung. Übermäßige Kraftanwendung auf den Steuerungsstift kann den Vibrator beschädigen.


Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten des Vibrators den Ein/Aus-Taster. Die Vibrationsstärke steigt nach dem Einschalten kurz auf das Maximum und fällt dann auf die mittlere Stärke ab.

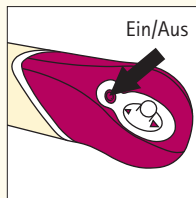


Drücken Sie zur Erhöhung der Vibrationsstärke den Steuerungsstift in Richtung max, zur Verringerung in Richtung min. Bei einzelnen Druckimpulsen ändert sich die Vibration schrittweise über insgesamt 9 Stufen. Wenn Sie den Steuerungsstift länger als 1 Sekunde gedrückt halten, verändert sich die Vibrationsstärke selbstständig.

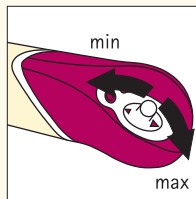

Um die 3 Vibrationsprogramme ablaufen zu lassen, halten Sie den Steuerungsstift bei maximaler Vibrationsstärke in Richtung max 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Vibrationswechsel spüren. Mit jedem weiteren Druck in Richtung max wechseln Sie das Programm.

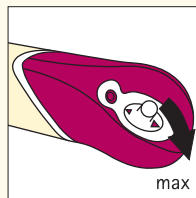


Zum Verlassen der Vibrationsprogramme drücken Sie den Steuerungsstift in Richtung min.

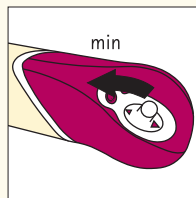


Laden

Der **ACTIVESinnflut® Woman** Vibrator wird mit vorgeladenen Akkus geliefert. Der Vibrator sollte vor dem ersten Laden vollständig entladen und danach mindestens 10 Stunden am Stück aufgeladen werden. Die maximale Leistungsfähigkeit der Akkus wird erst nach fünf vollständigen Ladungen und Entladungen erreicht.

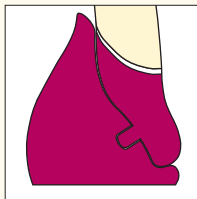

Stellen Sie den Vibrator mit dem Handstück und dem Stift der Vibrationssteuerung voran in die Ladestation. Der Vibrator muss bündig in der Ladestation sitzen, damit die Ladungsübertragung gewährleistet ist.

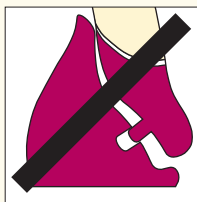

Die Akkus werden bei falsch eingesetztem Vibrator nicht geladen.

Der Vibrator richtet sich beim Einsetzen in die Ladestation selbsttätig aus. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, drücken Sie das Handstück nicht mit Gewalt in die Ladestation. Eine Erwärmung des Geräts beim Laden ist normal und ungefährlich, ein Überladen ist nicht möglich.

Wir empfehlen die Aufbewahrung des **ACTIVESinnflut® Woman** Vibrators in der Ladestation, damit die Akkus jederzeit voll geladen sind. Das vollständige Laden der Akkus nimmt mindestens 10 Stunden in Anspruch. Der Ladevorgang muss spätestens alle 3 Monate wiederholt werden, um die maximale Kapazität der Akkus zu erhalten und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie den **ACTIVESinnflut® Woman** Vibrator vor und nach jedem Gebrauch. Wir empfehlen die Reinigung mit milder Seife unter fließendem, handwarmem Wasser. Verwenden Sie für die Reinigung keine scharfen oder spitzen Gegenstände, ätzende Reinigungsmittel oder heißes Wasser mit mehr als +40° Celsius, da dies zu Beschädigungen des Vibrators führen kann. Trocknen Sie den Vibrator vollständig, bevor Sie ihn auf die Ladestation stellen. Reinigen Sie die Ladestation regelmäßig. Trennen Sie die Ladestation vor dem Reinigen vom Stromnetz. Für die Reinigung empfehlen wir milde Seife und ein feuchtes Tuch.



Die Ladestation darf keinesfalls hoher Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden. Trocknen Sie die Ladestation vollständig, bevor Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz verbinden.

Falls Sie Vibrator oder Ladestation desinfizieren wollen, wenden Sie sich zur Wahl der geeigneten Mittel an Ihren Arzt oder Apotheker.



Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen das Netzkabel. Benutzen Sie die Ladestation nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Umweltschutz



Der Vibrator enthält einen Nickel-Metallhydrid-Akkupack. Der Akkupack kann nicht ausgetauscht, aber zum Zweck der Mülltrennung ausgebaut werden.



Für die ordnungsgemäße Entsorgung des Akkupacks stehen Ihnen die Sammelbehälter des GRS-Batterien (Gemeinsames Rücknahmesystem) sowie andere Rücknahmestellen zur Verfügung.

Mit der Entfernung des Akkus erlischt die Garantie und das Gerät ist nicht mehr zu reparieren.

Ersatzteile

Alle **ACTIVESinnflut® Woman** Vibratoren und Ladestationen sind untereinander kompatibel. Beide Komponenten sind auch einzeln zu beziehen. Wenden Sie sich dazu an die Kundenbetreuung oder besuchen Sie unsere Webseite: www.medintim.de.

Problembhebung

Können Sie ein Problem nicht mit den folgenden Hinweisen beheben, wenden Sie sich an die **ACTIVESinnflut®** Kundenbetreuung oder besuchen Sie unsere Webseite www.medintim.de.

Der **ACTIVESinnflut® Woman** Vibrator funktioniert nicht.

- Laden Sie den Vibrator in der Ladestation mindestens 10 Stunden auf.
- Achten Sie darauf, dass die Ladestation mit einer stromführenden Steckdose verbunden ist, die nicht mit dem Raumlicht geschaltet wird.

Die Vibration scheint mit geringer Leistung zu erfolgen.

- Prüfen Sie, welche Vibrationsstärke eingestellt ist.
- Der Vibrator wurde zu lange oder zu kühl außerhalb der Ladestation gelagert und die Ladekapazität ist erschöpft.

Die Vibration erfolgt mit Unterbrechungen.

- Prüfen Sie, ob ein Vibrationsprogramm eingestellt ist.
- Die Ladekapazität des Akkupacks ist beinahe erschöpft.

Unangenehmer Geruch

- Reinigen Sie den Vibrator und die Ladestation gründlich.

Technische Daten

Ladestation: Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Vibrator: Stromversorgung 2 x 1,2 V 1 200 mAh Ni-MH

Leistung: 2 W

Ladezeit: 10 h

Laufzeit bei mittlerer Vibrationsstufe: 2 h

Zulässige Temperatur: 0° bis +40° C

Garantie

ACTIVE*Sinnflut*® Produkte werden mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktionskontrolle hergestellt. Sollte es trotzdem zu Mängeln innerhalb von 24 Monaten nach Verkaufsdatum kommen, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kann dieses Gerät an die Herstelleradresse gesandt werden. **Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!**

Um die Abwicklung zu beschleunigen, können Sie sich vorab mit der

ACTIVE*Sinnflut*® Kundenbetreuung in Verbindung setzen. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis für spätere Reklamationen auf.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden durch:


- unsachgemäßen Gebrauch
- Verwendung von silikonöhlhaltigen Gleitmitteln
- Nichteinhaltung der Reinigungshinweise
- Nichteinhaltung der Ladehinweise für den Akkupack
- unbefugte Eingriffe
- höhere Gewalt

Schicken Sie im Reparaturfall das Gerät gründlich gereinigt und angemessen verpackt zusammen mit der Fehlerbeschreibung, Ihrer Anschrift und dem dazugehörigen Kaufbeleg an die Herstelleradresse.

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Schäden, die durch den Transport entstehen, werden nicht getragen.

Art.Nr.: VIB ASW

Made in Germany. 



Hersteller/Distribution:
Kessel GmbH
Kelsterbacher Strasse 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

T +49 (6105) 20 37 20
F +49 (6105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de
www.medintim.de