



C Belt
Correa
Courroie
Gurt

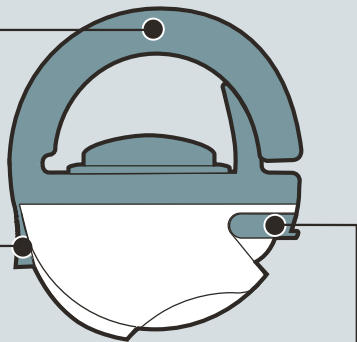

Urethral pressure actuator
Accionador de la presión de la uretra
Actionneur de pression urétrale
Harnleiter-Druckaktivator

Belt adjustment lever
Palanca de ajuste de la correa
Levier de réglage de la courroie
Hebel zur Anpassung des Gurts

A **B**

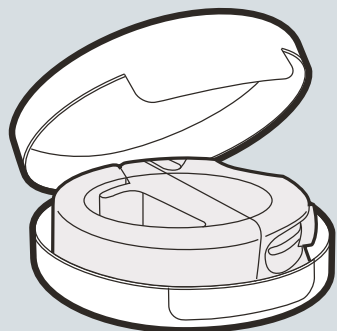

CONFORTABLE

Le Dispositif HAREX est fabriquée à partir de matériaux plastiques légers de haute qualité, testés techniquement pour ne pas absorber de liquides. Les dimensions du Dispositif sont de 48 x 54 x 18 mm. En plus d'être sûre, il est de petite taille et très confortable. Une fois placé, il deviendra un élément imperceptible et discret. Le Dispositif HAREX est entièrement réglable, il vous suffit de déplacer le levier de réglage pour l'adapter à la pression optimale.

PERMET LA CIRCULATION SANGUINE

Le dispositif n'appuie pas sur les côtés du pénis et peut donc être placée de jour comme de nuit. Il est toutefois recommandé de retirer le Dispositif HAREX la nuit en dormant afin de reposer le pénis. Pendant que vous êtes couché, vous pouvez utiliser une compresse. S'il est nécessaire de l'utiliser pendant la période où vous êtes couché, desserrez la courroie en exerçant une pression plus légère que celle que vous utiliseriez pendant la journée.

BOÎTE POUR RANGER LE DISPOSITIF

L'ensemble contient une boîte pour transporter et / ou ranger le dispositif. Elle est faite en plastique et peut donc être lavée, si nécessaire.

NETTOYAGE FACILE

Le Dispositif se nettoie facilement à la main avec de l'eau chaude et du savon. Il est fabriqué entièrement en matière plastique sanitaire. Le Dispositif passe inaperçu aux systèmes de détection de métaux, tels que ceux utilisés dans les aéroports.

CONSEILS UTILES

Si vous n'avez pas le besoin de vider la vessie, il est conseillé de relâcher le Dispositif toutes les 2 ou 3 heures pour éviter un remplissage excessif de la vessie. Patients circoncis: utilisez le Dispositif directement derrière la tête du pénis. Si vous êtes un peu en surpoids ou si vous n'êtes pas circoncis, avant de placer le Dispositif retirez la peau en arrière, car elle empêchera le Dispositif de bouger sous l'effet de la pression exercée par la base du pénis.

PLACEMENT DU DISPOSITIF

- 1 placez vers le bas le levier de réglage de la courroie (B) et desserrez la courroie.
- 2 Insérez le pénis dans le Dispositif.
- 3 Ajuster la courroie (C) au contour du pénis.
- 4 Déplacez le levier (B) vers le haut pour fixer la courroie (C).
- 5 Déplacez l'actionneur à pression (A) vers le haut, pour bloquer l'urètre.

Maintenez la région génitale propre pour éviter des irritations.

Si vous êtes conscient que le dispositif est mal placée, du à une pression inconfortable ou une douleur légère, cela signifie que le Dispositif est trop serrée. Desserrez un peu la courroie. Vérifiez qu'il n'y a pas de plis dans la peau du pénis car cela pourrait causer de l'inconfort. Avec le bon ajustement, vous vous sentirez à l'aise.

RETRAIT DU DISPOSITIF

- 6 Déplacez l'actionneur à pression (A) vers le bas.
- 7 Relâchez le levier de réglage (B) et desserrez la courroie de manière à laisser suffisamment d'espace pour retirer le pénis du Dispositif.

POUR URINER

- 8 Déplacez l'actionneur de pression urétrale (A) vers le bas.
- 9 Une fois terminé, relâchez la courroie et déplacez l'actionneur à pression (A) à la position initiale.

La courroie est conçue pour s'adapter sur le pénis en appliquant une légère pression sur l'urètre pour arrêter l'écoulement de l'urine. En cas de mauvais placement, cela peut causer de la douleur, alors assurez-vous de suivre les instructions indiquées.

En cas de doute, s'il vous plaît appelez-nous ou envoyez-nous un email et nous serons enchantés de vous aider. Nous avons les réponses à vos questions.

TERMES ET CONDITIONS

Vous utilisez le Dispositif à vos propres risques. Si vous avez un problème médical autre que l'incontinence, consultez votre médecin avant d'utiliser le Dispositif.

GARANTIE

La garantie du fabricant contre les défauts et les ruptures est valable 1 an à compter de la date d'achat. Les demandes de garantie doivent être préalablement approuvées. La facture d'achat sera requise pour tout type de réclamation. Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site Web à l'adresse: www.harex.net

Il est recommandé de remplacer l'appareil tous les 12 mois.

Fabriqué par

Mera Medical Solutions S.L.
Polígono Txalaka-Araneder
Troya Ibilbidea 18, Pabellón 6A5
20115 Astigarraga, Guipúzcoa - Spain
Tel: (+34) 943 291 918
info@harex.net

DE ACHTUNG:
Vor der Anwendung bitte die Gebrauchsanweisung lesen.

Millionen Männer auf der ganzen Welt leiden an Harninkontinenz. Manche verlieren vollständig die Kontrolle über die Urinabgabe, während andere kontinuierlich tröpfchenweise Harn verlieren. Eine Harnklemme ist die optimale Lösung, um einen aktiven und gesunden Lebensstil zu führen.

Das HAREX Gerät wird direkt unter dem Peniskopf befestigt und übt dort leichten Druck auf den Penisgrund aus, wodurch ein unfreiwilliger Verlust von Urin verhindert wird. Es ist klein, komfortabel und flexibel anpassbar und besteht aus waschbaren Materialien. Das Wichtigste ist jedoch, dass es die Lebensqualität verbessert und es Ihnen ermöglicht, Ihren Alltag wieder ohne Einschränkungen zu leben.

KOMFORT

Das HAREX-Gerät besteht aus leichten und hochwertigen, für die medizinische Anwendung zugelassenen Kunststoffen, die erwiesenermaßen keine Flüssigkeit aufnehmen. Das Gerät ist nur 48 x 54 x 18 mm groß und somit nicht nur sicher, sondern auch klein und komfortabel. Nach dem Anbringen werden weder Sie selbst noch Ihre Mitmenschen bemerken, dass Sie es tragen. Das HAREX-Gerät ist stufenlos anpassbar. Bewegen Sie dazu einfach den Anpassungshebel, bis der gewünschte Druck erreicht wird.

UNBEHINDERTE DURCHBLUTUNG

Das Gerät übt keinerlei seitlichen Druck auf den Penis aus und kann daher Tag und Nacht getragen werden. Wir empfehlen allerdings, das Gerät beim Schlafen in der Nacht abzunehmen und stattdessen eine Einlage zu verwenden, damit sich der Penis erholen kann. Wenn das Gerät auch im Liegen benötigt wird, sollte es so eingestellt werden, dass weniger Druck ausgeübt wird als tagsüber.

AUFBEWAHRUNGSBOX

Das Set enthält eine Box, in der das Gerät aufbewahrt und/oder transportiert werden kann. Es besteht aus Kunststoff, der bei Bedarf hygienisch gereinigt werden kann.

EINFACHE REINIGUNG

Das Gerät kann ganz einfach per Hand mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden. Es besteht ausschließlich aus Kunststoff, der für die medizinische Anwendung zugelassen ist. Es wird von Metalldetektoren, zum Beispiel am Flughafen, nicht erkannt.

NÜTZLICHE HINWEISE

Wenn der natürliche Bedarf zur Blasenentleerung nicht vorhanden ist, empfehlen wir, das Gerät alle 2 bis 3 Stunden zu lösen, um eine Überfüllung der Blase zu vermeiden. Beschnittene Patienten: Bringen Sie das Gerät direkt hinter dem Peniskopf an.

Wenn Sie leicht übergewichtig bzw. nicht beschnitten sind, ziehen Sie die Vorhaut zurück, bevor Sie das Gerät anbringen, damit dieses nicht aufgrund des Drucks an der Penisbasis verrutscht.

ANLEGEN DER GERÄT

- 1 Den Hebel (B) zur Anpassung des Gurts nach unten und den Gurt auflockern.
- 2 Den Penis in das Gerät einführen.
- 3 Den Gurt (C) an den Penis anpassen.
- 4 Den Hebel (B) nach oben schieben, um den Gurt (C) zu befestigen.
- 5 Den Druckaktivator (A) nach oben schieben um die Harnröhre zu blockieren.

Sorgen Sie dafür, dass der Genitalbereich stets sauber ist, um Irritationen zu vermeiden.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Gerät schlecht sitzt und einen unangenehmen Druck oder leichte Schmerzen verspüren, bedeutet dies, dass das Gerät zu eng ist. Lockern Sie den Gurt etwas. Versichern Sie sich, dass die Penishaut keine Falten wirft, da dies Schmerzen verursachen könnte. Das Gerät sitzt korrekt, wenn Sie es nicht spüren.

ENTFERNEN DER GERÄT

- 6 Den Druckaktivator (A) nach unten schieben.
- 7 Den Anpassungshebel (B) lösen und den Gurt so weit lockern, dass der Penis aus der Gerät entfernt werden kann.

UM ZU URINIEREN

- 8 Den Harnleiter-Druckaktivator (A) nach unten schieben
- 9 Anschließend den Gurt loslassen und den Druckaktivator (A) in seine ursprüngliche Position bringen.

Der Gurt wurde so entwickelt, dass er am Penis anliegt und dabei leichten Druck auf den Harnleiter ausübt, um den Urinfluss zu unterbrechen. Wenn er falsch platziert wird, kann er Schmerzen verursachen. Versichern Sie sich daher, dass Sie die Anweisungen genau befolgen.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an oder senden Sie uns ein E-Mail. Wir helfen Ihnen gerne und können bestimmt alle Ihre Fragen beantworten.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Nutzung des Geräts erfolgt auf eigene Gefahr. Wenn außer Inkontinenz noch andere Krankheiten vorliegen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie die Vorrichtung verwenden.

GARANTIE

Die Herstellergarantie gilt für Defekte und Schäden, die innerhalb eines Jahres nach dem Kauf auftreten. Garantieansprüche müssen im Vorhinein vom Hersteller genehmigt werden. Für sämtliche Reklamationen ist der Kaufbeleg erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.harex.net

Es wird empfohlen, die Vorrichtung alle 12 Monate zu ersetzen.

Hergestellt von:

Mera Medical Solutions S.L.
Polígono Txalaka-Araneder
Troya Ibilbidea 18, Pabellón 6A5
20115 Astigarraga, Guipúzcoa - Spain
Tel: (+34) 943 291 918
info@harex.net

FR ATTENTION
Avant d'utiliser le Dispositif, lisez les instructions attentivement.

L'incontinence urinaire touche des millions d'hommes dans le monde. Certains subissent une perte totale de contrôle de l'urine, tandis que d'autres peuvent avoir un écoulement d'urine continu. Le Dispositif urinaire est la meilleure solution pour avoir une vie active et saine.

HAREX est un Dispositif qui est placé juste après la tête du pénis et à travers d'une légère pression sur sa base, il empêche et contrôle l'échappement involontaire de l'urine. Il est petit, confortable et entièrement réglable. Il est construit avec des matériaux lavables, et le plus important est qu'il améliore la qualité de la vie et permet de retrouver la normalité au quotidien sans que rien ne vous conditionne.

PLACEMENT DU DISPOSITIF ANLEGEN DES GERÄT



Configuration initiale.


Grundeinstellung.




- 1 Déplacez le levier vers le bas. Desserrez la courroie.
Den Hebel bewegen runter. Den Gurt auflockern.




- 2 Introduisez le pénis dans le Dispositif.
Den Penis in das Gerät einführen.

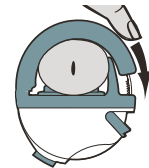


- 3 Ajustez la courroie au contour du pénis.
Den Gurt an die Peniskontur anpassen.

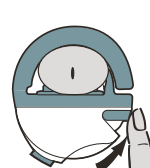

- 4 Déplacez le levier vers le haut pour fixer le courroie.
Den Hebel nach oben schieben um den Gurt zu befestigen.

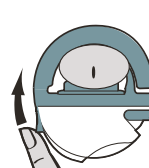


- 5 Déplacez l'actionneur de pression vers le haut.
Den Druckaktivator nach oben schieben.

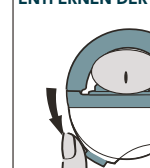


- 6 Déplacez l'actionneur de pression vers le bas.
Den Druckaktivator nach unten schieben.



- 7 Relâchez le levier de réglage et desserrez la courroie; Retirez le pénis du Dispositif.
Den Anpassungshebel lösen und den Gurt lockern, den Penis aus dem Gerät entfernen.

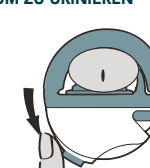

- 8 Déplacez l'actionneur de pression vers le bas.
Den Druckaktivator nach unten schieben.

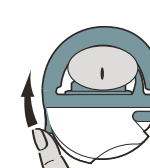

- 9 Une fois terminé, déplacez l'actionneur de pression à la position initiale.
Den Druckaktivator in die ursprüngliche Position bringen.