

Vagiwell® Dilator No. 6

Vaginaler Dehnungsstift zur persönlichen, häuslichen Anwendung

Der Vagiwell® Dilator Größe No. 6 wurde für Frauen entwickelt, die

- infolge einer Neovagina-Operation bougieren bzw. postoperativ die Scheide „offen“ halten wollen.
- infolge von Lichen Sclerosus die Scheidenöffnung funktionsfähig erhalten wollen.

Anwendung

Ziel der Einlage des Vagiwell No. 6 ist das „Offenhalten“ der Scheide, z.B. post-operativ.

1 Waschen Sie den Vagiwell® Dehnungsstift vor der ersten Anwendung mit heißem Wasser und milder Seife und trocknen Sie diesen sorgfältig ab. Wichtig: Bei **klinischer** Anwendung ist der Vagiwell Dehnungsstift vor der Einlage gem. dem zertifizierten, internen klinischen Verfahren zu reinigen und sterilisieren.

2 Der Vagiwell No. 6 wird bei entspannter Körperlagerung eingeführt.

3 Benetzen Sie den Scheideneingang und den Dehnungsstift ggf. mit einem wasserlöslichen Gleitmittel.

4 Zur Einlage kann der Dehnungsstift ggf. an einem Suspensorium befestigt werden.

Hierzu hat der Vagiwell No. 6 drei spezielle Ösen. Eine enge, feste Unterwäsche kann den Dehnungsstift ebenfalls positionieren.

5 Lassen Sie den Dehnungsstift einige Minuten in der Scheide liegen und prüfen Sie, ob Sie Schmerzen haben. Falls dies nicht der Fall ist, kann der Dehnungsstift liegen bleiben.

6 Zum Entfernen ziehen Sie den Dehnungsstift vorsichtig aus der Scheide und bleiben noch einige Minuten entspannt liegen. Bei längerer Einlage empfehlen wir, den Dehnungsstift einmal täglich herauszunehmen und mit warmem Wasser und milder Seife zu reinigen.

Reinigung und Desinfektion:

Die Vagiwell® Dehnungsstift No. 6 ist für den persönlichen Gebrauch nur durch eine Anwenderin gedacht. Nach dem Gebrauch reinigen Sie den Dehnungsstift mit lauwarmen Wasser und milder Seife. Das Material ist auf Biokompatibilität gem. ISO 10993 -1 geprüft.

Lieferumfang:

- 1 Vagiwell® Dehnungsstift
- 1 Tube Gleitmittel SYLK, wasserlöslich, 50 ml
- Tasche zur Aufbewahrung
- Faltschachtel
- Gebrauchsanweisung

Inhalt:

- 1 x Dehnungsstift Nr. 6

Größe	Farbe	Durchmesser A / B	Länge C
No.6	weiß	36,5/40mm	150mm

Material:

- Vagiwell® Dehnungsstift: Silikon
- Primärverpackung: Polyurethan

Medizinprodukt CE

Herstellung und Vertrieb

KESSEL MEDintim GmbH
Nordendstr. 82 - 84
64546 Mörfelden-Walldorf

Tel. +49 6105 203720

Web: www.medintim.de

E-Mail: service@medintim.de

Bezug:

In Apotheken, Sanitätshäusern, im Fachhandel oder online erhältlich unter www.medintim-shop.de

