




MANUAL *Erection System*[®]

Vakuum – Erektionshilfe bei erektiler Dysfunktion

Häufige Ursachen von Erektionsstörungen sind:

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- Erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- Neurologische Krankheiten (Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und Alkoholmissbrauch

Das **MANUAL *Erection System***[®] ist eine Alternative zur medikamentösen Behandlung.

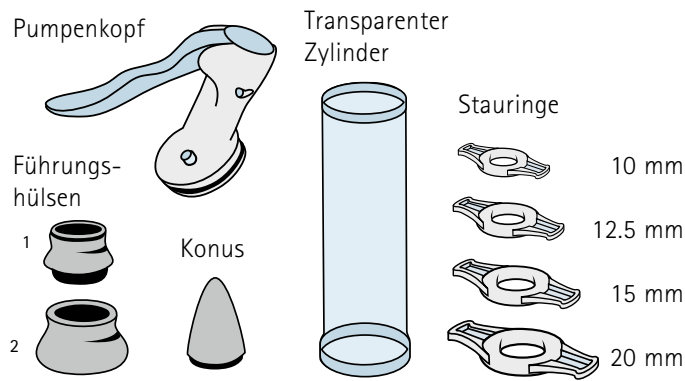

Das **MANUAL *Erection System***[®] besteht aus:

- Transparenter Zylinder
- Manuelle Vakuum Pumpe
- Führungshülse 1 und 2
- Konus
- vier verschiedenen Stauringen (Innendurchmesser 10; 12,5; 15 und 20 mm)
- Sylk Gleitmittel 50 ml Flasche
- Gebrauchsanweisung
- DVD mit der Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung

Pos.-Nr.: 99.27.02.0022
 Apotheken PZN 4605935
 EAN: 4013273001175
 Art.-Nr.: MES 01
 Made in Germany.

 Medizinprodukt



KESSEL medintim GmbH
 Kelsterbacher Straße 28
 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
 Fax (06105) 45 59 01
 E-Mail: service@medintim.de



MES 01 (06/2012) 01



MANUAL *Erection System*[®]

Vakuum – Erektionshilfe bei erektiler Dysfunktion



MANUAL *Erection System*[®]

Vakuum – Erektionshilfe bei
erektiler Dysfunktion

Anwendung

Das **MANUAL *Erection System***[®] ist ein
medizinisches Hilfsmittel, um eine Erektion
zu erlangen.

Die Vakuumpumpe bewirkt einen Unterdruck
im Zylinder um den Penis. Hierdurch füllen
sich die Schwellkörper mit Blut und führen zu
einer Versteifung des Gliedes. Nun wird einer
der Stauringe über den Penisschaft gestreift.
Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders
den Rückfluss des Blutes und hält dadurch
die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen
Erektion ist ein normaler und befriedigender
Geschlechtsverkehr möglich.

Alle Teile können in der mitgelieferten Tasche
aufbewahrt werden.



Eigenschaften

Das **MANUAL *Erection System***[®] lässt sich leicht
mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Hierzu
den Pumpenkopf vom Gerät abnehmen. Alle Teile,
auch die Stauringe in verschiedenen Größen, können
auch nach Jahren noch nachbestellt werden.

Nach einer Prostata OP empfehlen wir dieses manu-
elle System, da es rascher einen stärkeren Unterdruck
erzeugt, als eine elektrische Vakuumerektionshilfe.

Das **MANUAL *Erection System***[®] ist ein
von den Krankenkassen anerkanntes
Hilfsmittel und kann vom Arzt verordnet werden.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

Weiter Informationen finden Sie unter:
www.active-erection-system.de/mes